

# Validierung Eurosafe 60

## Programme freischalten

Die Programme Kurz, Standard und Intensiv im Eurosafe 60 sind jeweils in 4 Phasen aufgeteilt. Für eine einfache Prozesskontrolle im Rahmen der Validierung kann jede Phase als einzelnes Programm aktiviert und ausgeführt werden.

Validierprogramme aktivieren	Eurosafe 60 silber	Eurosafe 60 weiss
1. Eurosafe 60 einschalten.		
2. <b>Taste Programm/Einstellungen</b> gedrückt halten bis im Display „Anfang Menü“ erscheint.		
3. Mit den Tasten <b>P1/P2</b> zu „Programm wählen“ navigieren.		
4. Mit der <b>Start-Taste</b> bestätigen.		
5. Passwort* eintragen (P1/P2 Zeichenauswahl, jedes Zeichen mit Start-Taste bestätigen).		
6. Mit den Tasten <b>P1/P2</b> das zu validierende Programm (Kurz, Standard, Intensiv) inklusive dem Zusatz V1 auswählen (Beispiel StandardV1). Mit der <b>Start-Taste</b> bestätigen.	 	 
7. Mit Taste <b>P1</b> (Auswahl Ja) und der <b>Start-Taste</b> aktivieren.		
8. Schritte 6 und 7 für die Programme mit der Endung V2, V3, V4 wiederholen (Beispiel StandardV2).		
9. Menü verlassen (Stopp-Taste 2x kurz antippen, danach gedrückt halten)		
10. Die Validierprogramme stehen jetzt zur Verfügung und können durch wiederholtes Drücken der <b>Taste Programm/Einstellungen</b> angewählt werden. Ist das Programm ...V1 durchgelaufen kann eine Wasserprobe entnommen werden. Danach Programm ...V2 starten usw. Sind die Programme von V1-V4 durchgelaufen entspricht das einem vollständigen Zyklus des regulären Programms.		

\*Bitte erfragen Sie das Passwort beim Euronada Kundendienst unter: Tel. 02505 389-252.

**WICHTIG:** Zur Vermeidung von Fehlbedienungen im regulären Betrieb die **Validierungsprogramme nach der Nutzung unbedingt wieder deaktivieren!** Dazu die Schritte 1-9 erneut durchgehen und bei Schritt 7 P2 (Auswahl Nein) drücken.