

## E6 / E8 - Meldung M1 und M2

Nachricht	M1	M2	M3	M4
<b>Bedeutung</b>	Bakteriologischen Filter ersetzen	Türdichtung ersetzen	Außerordentliche Wartung erforderlich	Tankreinigung
<b>Lösung</b>	Den Filter so bald wie möglich austauschen und dann den Zähler des Filters zurücksetzen	Die Dichtung so bald wie möglich ersetzen und dann den Zähler der Dichtung zurücksetzen	Sich mit dem Kundendienst für die außerordentliche Wartung in Verbindung setzen	Mit der Reinigung der Tanks fortfahren. Die Meldung wird beim nächsten Zyklus automatisch zurückgesetzt

## Zähler zurücksetzen

Reset verfügbar ab Firmware SPF7 - SS1 Version 04.490 - SS2 Version 2.1.40

1. Am Hauptmenü **Einstellungen** (Abb. A) wählen, um den **Service 1** (Abb. B) mit dem Passwort "12345" (Abb. C) aufzurufen;
2. **Wartung** auswählen (Abb. D). In diesem Menü können die Zähler des bakteriologischen Filters und der Dichtung im Falle von M1 oder M2 zurückgesetzt werden.

Abb. A



Abb. B



Abb. C

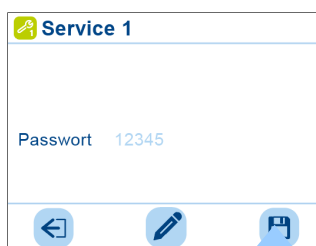


Abb. D



## M1- Rückstellung Zähler des bakteriologischen Filters




1. Auf **Wartung** (Abb. D) **Filter** auswählen;
2. Das Symbol **Zurücksetzen**  (unten links) (Abb. F) drücken;
3. Der Zähler wird auf den Standardwert zurückgesetzt;
4. Das Symbol **OK**  drücken; zum Abspeichern drei Sekunden lang auf das Symbol **Speichern**  (Abb. G) drücken;.

Abb. E



Abb. F



Abb. G



3 Sekunden

## M2 - Rückstellung Zähler der Türdichtung




1. Auf **Wartung** (Abb. H) **Türdichtung** auswählen;
2. Das Symbol **Zurücksetzen**  (unten links) (Abb. I) drücken;
3. Der Zähler wird auf den Standardwert zurückgesetzt;
4. Das Symbol **OK**  drücken und zum Abspeichern drei Sekunden lang auf das Symbol „Speichern“ drücken  (Abb. K);.

Abb. H



Abb. I

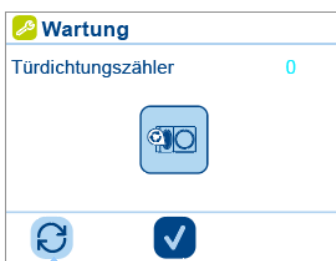


Abb. K



3 Sekunden